

دستورالعمل استفاده از ماسک ذغال فعال

ماسک ذغال فعال به سه دسته FFP1 و FFP2 و FFP3 تقسیم بندی می شود. قبل از استفاده باید نوع ماسک مناسب انتخاب گردد.

موارد استفاده :

- ۱- FFP1 قابل استفاده در برابر آئروسول های مایع و جامد غیرسمی با غلظت ۴/۵ برابر حد مجاز (TLV,MAC,OEL) می باشد
- ۲- FFP2 قابل استفاده در برابر آئروسول های غیرسمی و همچنین آئروسول هایی با سمیت کم تا متوسط با غلظت دوازده برابر حد مجاز (TLV,MAC,OEL) می باشد
- ۳- FFP3 قابل استفاده در برابر آئروسول های مایع یا جامد غیرسمی ، آئروسول های با سمیت متوسط و بالا همچنین آئروسول های رادیواکتیو در غلظت ۵۰ برابر حد مجاز (TLV,MAC,OEL) می باشد .

روش استفاده :

- ۱- قبل از ورود به محل آلوده ماسک را از نظر Fix شدن روی صورت و نشستی چک نمایید.
- ۲- ماسک را در کل طول تماس با آلاینده بپوشید.
- ۳- ماسک را بر اساس قوانین ایمنی و بهداشتی استفاده نمایید.
- ۴- در موارد زیر ماسک را تعویض نمایید.
(الف) ماسک آسیب دیده باشد
(ب) مجرای ورود هوای ماسک بسته شده باشد و تنفس مشکل گردد.
- ۵- محیط کار را در صورت احساس گیجی، تحریک و یا هر نوع عارضه دیگری ترک کنید.
- ۶- ماسکهایی که می خواهید از آنها استفاده کنید در پلاستیک تمیز و در جعبه در بسته در هوای خشک و غیر آلوده (۲۰- تا ۴۰ درجه سانتیگراد) باید نگهداری شوند.

تمیز کردن و ضد عفونی:

در صورت استفاده مجدد از ماسک باید بعد از هر شیفت کاری تمیز شود و در یک جعبه در بسته قرار گیرد .
در صورت لزوم سطح بیرونی ماسک را با برس تمیز کرده و سطح بیرونی فیلتر را به وسیله پنبه که با مواد ضد عفونی شده آغشته شده است آلودگی زدایی کنید و بعد از خشک شدن آن را در محل مناسب نگهداری کنید.
قبل از استفاده از کارکرد فیلتر مطمئن شوید

کارشناس واحد ایمنی و بهداشت

توضیحیان